



So einfach geht's

Anwendung

1. Anziehhilfe wie auf dem Bild auslegen.

1



! 2. Die obere überstehende Lasche nach innen einschlagen, sodass eine Tasche entsteht.

3. Den Fuß in die obere Tasche stellen.

4. Der Kompressionsstrumpf lässt sich nun ganz einfach über den Fuß und über die Ferse ziehen.

5. Mit der Hand das lange, noch herausstehende Ende der Anziehhilfe greifen und nach hinten rausziehen. WICHTIG: Beim Herausziehen bitte die Zehen nach unten hin und her bewegen, damit die Anziehhilfe ganz leicht nach hinten weggezogen werden kann.

2



3



4



5



Rutschgefahr! Easy-light bitte niemals auf dem Boden liegen lassen.

Vorsicht! Die obere Schlaufe dient nur zum Aufhängen der Anziehhilfe. Nicht daran ziehen!

Garantie: sechs Monate nach dem Kauf bei Material- oder Fertigungsfehlern.

Reinigungsanleitung



- Handwäsche bei 30 °C
- Keine Bleichmittel verwenden
- Bei Nutzung unterschiedlicher Anwender ist eine Wischdesinfektion mit medizinisch zugelassenem Desinfektionsmittel erforderlich.

EASY
LIGHT



Dirk Junge • Römerstraße 23 • D-86981 Kinsau
Tel. 0 88 69 - 92 10 19 • Fax 0 88 69 - 92 12 59 • info@jungeservice.de

Artikel Code 12880 CE



Anziehhilfe Easy-light

für Kompressionsstrümpfe

mit offener oder geschlossener Fußspitze

EASY
LIGHT

Produktvideo



Patent Nr.: 102012100122

HMV Pos.-Nr.: 02.40.01.3042